



RAC- Verstärker

**nach
Lukas & Dr. Dr. Ludger Stenneken**

Die Arbeitsschale

für die neue Ohrakupunktur nach Prof. Bahr

Die Arbeitsschale:

Wir haben die Arbeitsschale entwickelt, um einen strukturierten Arbeitsablauf in der neuen Ohrakupunktur nach Prof. Bahr zu ermöglichen.

Sie bietet Platz für die häufig benutzten Hilfsmittel einer Behandlungssitzung wie z.B. den 9-Volt-Stab, den Bahr-Detektor, einen Polfilter und verschiedene Ampullen. Es gibt zwei Fächer für Dauernadeln, die einzeln geschnitten eingelegt werden. Die einzeln verpackten Desinfektionstücher und Tupfer finden ebenso ihren Platz wie zwei Markierungsstifte und die runden Pflaster zur Abdeckung der Dauernadeln.

Eine beispielhafte Bestückung zeigt dieses Foto:



Im unteren rechten Bereich findet sich der Platz für eine Klemmpinzette, einen Pinselhalter, Einwegpinsel (unter dem Sprühkleber), Dappenbehälter und Hansaplast® Sprühpflaster 40 ml (Durchmesser 34 mm). Man gibt etwas Sprühkleber in einen Dappenbehälter und pinselt den Kleber mit einem Einwegpinsel um die gesetzten Dauernadeln auf die Haut. Nach einer Trocknungszeit von ca. 3 Minuten wird das runde Pflaster mit der Klemmpinzette am Rand vom Trägerpapier entnommen und mittig auf die Dauernadel geklebt. Dadurch halten die Pflaster 7-10 Tage gut auf der Dauernadel und fallen nicht zu früh ab.

Sie finden auf der Internetseite von Akupunkturbedarf Blum ein ausführliches Erklärungsvideo für die Bestückung der Arbeitsschale sowie für die oben beschriebene Klebtechnik.

Die Arbeitsschale bietet weiterhin Platz für die folgenden RAC-Verstärker:

Vitaminfächer, V-Halter, 2 Ampullenhalter kompakt für die Ampullen mit Oregon Grape und Blue China Orchid, den Implantatnadelhalter und den Dauernadel-Pen, die separat erhältlich sind.

Die RAC-Verstärker:

RAC-Verstärker sind Hilfsmittel, um den **Reflexe Auriculo-Cardiaque** bei aktiven Punkten der Ohrakupunktur nach Nogier und Bahr deutlicher werden zu lassen.

Dies erfolgt konstruktionsbedingt durch eine verbesserte Fokussierung der Informationen auf einen Punkt und / oder durch Ausschalten des Einflusses eventuell aktiver Punkte des Behandlers.

Sicherheitshinweise:

Die Arbeitsschale ist aus dem gleichen Kunststoff hergestellt worden, wie die RAC-Verstärker. Dieser thermoplastische Kunststoff ist durch seine Eigenschaften empfindlich gegen Verbiegen, Herunterfallen und gegen Temperaturveränderungen. Die Arbeitsschale darf daher nicht in der Sonne, in der Nähe von künstlichen Wärmequellen oder im Kühlschrank gelagert werden. Sie wird im 3D-Druckverfahren hergestellt und weist daher sichtbare Schichten / Streifen auf.

Das Material ist nebelfeucht desinfizierbar mit Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis. Die Arbeitsschale ist nicht thermisch desinfizier- oder sterilisierbar.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit der Arbeitsschale!

Vertrieb:

Akupunkturbedarf Karl Blum GmbH
Breslauer Straße 42
D - 82194 Gröbenzell
Tel.: 0 81 42 / 44 84 80
Fax: 0 81 42 / 44 84 820
Internet: www.Blum-Akupunktur.de
Mail: info@blum-akupunktur.de