



Dauernadel- Pen

nach
**Lukas & Dr. Dr. Ludger
Stenneken**

Sicherheitshinweise:

Der Dauernadel-Pen ist wie auch die RAC-Verstärker aus dem gleichen Kunststoff hergestellt worden, welcher keine nennenswerte Eigenschwingung hat, die das Messergebnis bei der RAC-Tastung verfälschen könnte.

Dieser thermoplastische Kunststoff ist allerdings durch diese Eigenschaft empfindlich gegen Verbiegen, Herunterfallen und gegen Temperaturveränderungen. Der Dauernadel-Pen darf daher nicht in der Sonne, in der Nähe von künstlichen Wärmequellen oder im Kühlschrank gelagert werden. Der Dauernadel-Pen wurde im 3D-Druckverfahren hergestellt und weist daher sichtbare Schichten / Streifen auf.

Das Material ist nebelfeucht desinfizierbar mit Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis.

Der Pen ist nicht thermisch desinfizier- oder sterilisierbar. Bei

Verwendung des Dauernadel-Pen ist kein direkter Hautkontakt zum Patienten vorgesehen. Er ist von Kindern fernzuhalten und nur von in der RAC-kontrollierten Ohrakupunktur ausgebildeten Therapeuten am Patienten anzuwenden.

Der Therapeut trägt zu jeder Zeit die volle Verantwortung für eventuelle Verletzungen durch falsche oder missbräuchliche Anwendung des Dauernadel-Pen. Ebenso trägt er auch bei Verwendung unserer RAC-Verstärker jederzeit die volle Verantwortung für die Behandlung der Patienten.

Da der Halter zum Setzen von Dauernadeln verwendet wird, sind alle Richtlinien und Anweisungen für das Setzen von Dauernadeln zu beachten!

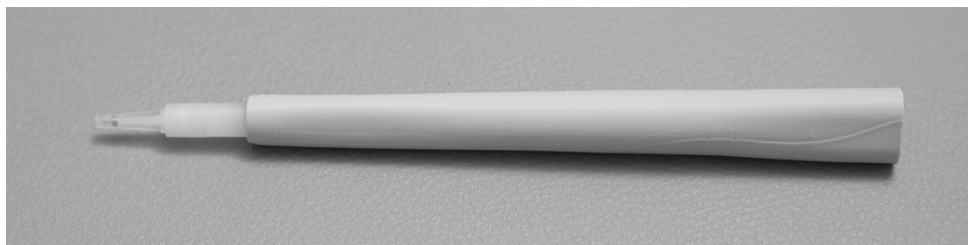
Ein defekter Dauernadel-Pen darf nicht weiterverwendet werden. Die Entsorgung erfolgt über den normalen Hausmüll.

Benutzungshinweise:

Der Dauernadel-Pen wird mit Dauernadeln der Firmen ASP und Blum Perma-Klick verwendet und gibt dem Therapeuten mehr Sicht auf das Ohr bei der Nadelung. Die Dauernadel wird mit der Rückseite in die vorgesehene Öffnung an der Spitze des Pen eingesetzt.

Starkes Abwinkeln ist dabei zu vermeiden. Nach dem Setzen der Dauernadel in das Ohr des Patienten wird der leere Halter der Dauernadel gerade nach vorne abgezogen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit dem Dauernadel-Pen!

**Vertrieb:**

Akupunkturbedarf Karl Blum GmbH
Breslauer Straße 42
D - 82194 Gröbenzell
Tel.: 0 81 42 / 44 84 80
Fax: 0 81 42 / 44 84 820
Internet: www.Blum-Akupunktur.de
Mail: info@blum-akupunktur.de