

!!! Achtung - Wichtiger Reset- Hinweis !!!

- Der „Power ON/OFF Knopf“ (rechte Seite, seitlich) ist mit einer Doppelfunktion belegt. Er dient ebenfalls dazu das Gerät im Bedarfsfall zu „resetten“ also in den Auslieferungszustand zurück zu setzen.
- Dies kann notwendig werden, wenn z. B. kein Stromausgang an den Buchsen 1 bis 6 mehr verzeichnet werden kann.
- Hierzu ist es zunächst notwendig alle Drehknöpfe am Gerät auf OFF / Null zu setzen!
- Danach das Gerät am „Power ON/OFF Knopf“ (rechte Seite) einschalten ohne weitere Knöpfe zu betätigen, 5 Sekunden warten, es wieder ausschalten, nochmals 5 Sekunden warten und es dann erneut wieder einschalten.
- Das Gerät ist wieder betriebsbereit.
- Bevor Sie den Power ON/OFF Knopf zum Beenden der Behandlung betätigen, bitte zuvor alle Knöpfe (Frequenzregler und Intensitätsregler) auf OFF / Null stellen und erst danach das Gerät über den Power ON/OFF Knopf ausschalten!

www.hwato.de



Hwato Akupunkturnadeln die Nr. 1 Chinas
in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen
Moxa- Tape- Schröpfbedarf und vieles mehr....

Hwato Deutschland GmbH + Irslenbach 19 + 78727 Oberndorf a.N.
Tel.: 07423 95 79 800 + Fax: 07423 92 79 801 + E-Mail: info@hwato.de