

# Therapiesets

Non-invasive Laserdiagnose und -therapie

## Frequenzhandbuch - LaserPen/Polylaser



# Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	.....	3
2	Nogier/Bahr	.....	4
	2 Programmgruppen	Nogier A'-G', Bahr 1-7	
3	Reininger/Bahr	.....	5
	1 Programmgruppe	Meridiane	
4	Bahr	.....	6
	1 Programmgruppe	Energiemeridian/Chakra/OM	
5	Reininger	.....	11
	1 Programmgruppe	Viral/bakteriell	
6	Hersteller /Vertrieb	.....	22

## Biofrequenzen, die wirken

Das Lasertherapiekonzept von Reimers & Janssen beruht auf der Erfahrung von über 35 Jahren Entwicklung und Produktion medizinischer Lasertherapiegeräte. Lasertherapie heißt für uns: Umsetzung neuer komplementärer Diagnose- und Therapiemethoden mittels sanfter Laserenergie.\*

Unsere Laser ermöglichen die Nutzung von Biofrequenzen über einfache Handhabung. Alle Laser neuerer Generation aus dem Hause Reimers & Janssen basieren auf dem gleichen Bedienkonzept: Eine standardisierte Software für alle Laser und Anwendungen. Einmal mit der intuitiven Bediensoftware vertraut, kann der Therapeut mit jedem Therapieprogramm sofort anfangen zu arbeiten.

Die Biofrequenzen basieren auf den Forschungen von

**Dr. Paul Nogier** (1908-1996), Frankreich

**Dr. Frank Bahr**, Schüler von Dr. Paul Nogier und Gründer der Deutschen Akademie für Akupunktur und Aurikulomedizin (DAAA)

**Dr. Manfred Reininger**, Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für kontrollierte Akupunktur (OGKA)

**Dr. Christoph Scholtes**, Ausbildungsleiter und Dozent für Aurikulomedizin und Akupunktur, Co-Präsident der Schweizerischen Ärztinnen- und Ärztesgesellschaft für Akupunktur - Chinesische Medizin - Aurikulomedizin, SACAM.

Die DAAA, OGKA und die SACAM bieten regelmäßig Fachfortbildungen zur Anwendung der Frequenzen an.

Auf den nächsten Seiten finden Sie alle aktuellen Therapieprogramme tabellarisch genau so zusammengefasst, wie Sie in der Software dargestellt werden. Informieren Sie sich über neue Frequenzen bitte bei Ihrem Vertriebspartner, damit Sie und Ihre Patienten immer vom neuesten Forschungsstand profitieren.

\* Die Low Level Lasertherapie und Akupunktur ist in Deutschland wissenschaftlich noch nicht anerkannt und gehört zu den komplementären Therapieverfahren.

# Programmgruppe Nogier/Bahr

2

Nogier A'-G', CW, Bahr 1-7, Analgesie/Hysterie

Nogier A' (A'')-G'/CW	
Programm	Frequenz (Hz)
A'	292,00
B'	584,00
C'	1.168,00
D'	2.336,00
E'	4.672,00
F'	9.344,00
G'	18.688,00
A''	37.376,00
CW*	0,00

Bahr Analgesie, Hysterie	
Programm	Frequenz (Hz)
An	963,50
Hy	1.131,00

\*Die Funktion ist bei gepulsten Sonden (904 nm) nicht vorhanden, stattdessen 10.000 Hz.

Bahr 1-7	
Programm	Frequenz (Hz)
B1	599,50
B2	1.199,00
B3	2.398,00
B4	4.796,00
B5	9.592,00
B6	19.184,00
B7	38.368,00

# Programmgruppe Meridiane

3

## Meridiane

Meridiane	
Programm	Frequenz (Hz)
Lunge	824,00
Dickdarm	553,00
Magen	471,00
Milz/Pankreas	702,00
Herz	497,00
Dünndarm	791,00
Blase	667,00
Niere	611,00
Kreislauf-Sexus	530,00
3 Erwärmer	732,00
Gallenblase	583,00
Leber	442,00

Nicht im LaserPen Praxis (Typ 130) enthalten.

# Programmgruppe Bahr

4

## Energiemeridian/Chakren/OM

EN-Meridian -4-6	
Programm	Frequenz (Hz)
-4 EN	363,00
-3 EN	3.858,00
-2 EN	3.854,00
-1 EN	3.850,00
0 EN Wende	3.790,00
1 EN Basis	4.023,00
2 EN Sexualchakra	3.123,00
3 EN Nabelchakra	2.398,00
4 EN Herzchakra	1.589,00
5 EN Halschakra	990,00
6 EN Stirnchakra	573,00

EN-Meridian 18-24	
Programm	Frequenz (Hz)
18 EN Innere Stabilität	7.715,00
19 EN Selbstheilung	4.625,00
20 a EN Energie 1-2	8.713,00
20 b EN Energie 1-3	9.614,00
20 c EN Energie 1-4	9.904,00
20 d EN Energie 1-5	9.983,00
21 EN Selbstentfaltung	2.666,00
22 EN Seelenwärme	3.751,00
23 EN Wohlfühlen	9.637,00
24 a EN Reinheit 1	8.713,00
24 b EN Reinheit 2	9.641,00

EN-Meridian 7-17	
Programm	Frequenz (Hz)
7 EN Kronenchakra	232,00
8 EN Schamanen 8	7.696,00
9 EN Schamanen 9	7.696,50
10 EN Schutz	7.697,00
11 EN Pocken	7.698,00
12 EN Pest	7.699,00
13 EN Störherd	7.700,00
14 EN Über-Omega	7.707,00
15 EN Meister Konstitution	7.708,00
16 EN Geistiger Kern	7.710,00
17 EN Lösen von Belastung	7.713,00

EN-Meridian Meister	
Programm	Frequenz (Hz)
25 EN geistiger Horizont	9.909,00
26 EN tiefer innerer Frieden	9.990,00
27 EN Yin/Yang	9.996,00
Meister Qi	7.695,00
Meister neg. Qi	363,00
EN MAX-OM	136,10

Nicht im LaserPen Praxis (Typ 130) enthalten.

# Programmgruppe Reinerger

5

Viral/Bakteriell/Allergie/Tinnitus

Viral/Bakteriell/Allergie/Tinnitus	
Programm	Frequenz (Hz)
Virale Belastung	1.408,00
Bakterielle Belastung	1.664,00
Allergische Belastung	3.648,00
Tinnitus	4.090,00

Nicht im LaserPen Praxis (Typ 130) enthalten.



REIMERS & JANSSEN GmbH  
Photomedizin - Lasertherapie



Zertifiziert nach ISO 13485:2016 + AC:2016

Fabrikstraße 22  
79183 Waldkirch

Tel. +49-7681 - 493 4149    [service@rj-laser.com](mailto:service@rj-laser.com)  
Fax +49-7681 - 493 4150    [www.rj-laser.com](http://www.rj-laser.com)

V.1.0 18.02.2021

Vertriebspartner

