

**PAJUNK®**

## **Plexus NanoLine**

*Das Produktprogramm für die einzeitige  
und kontinuierliche Plexusanästhesie*



**Plexus**

*Effektiv und wirksam*



## Periphere Nervenblockaden

Die Regionalanästhesie ist zum festen Bestandteil der täglichen chirurgischen Praxis geworden. Neben den einzeitigen Techniken für die peripheren Blockaden beim operativen Eingriff helfen die kontinuierlichen Techniken, darüber hinaus die postoperativen Schmerzen zu lindern, das operative Ergebnis zu verbessern und den Patientenkomfort zu erhöhen.



Mit einem **umfassenden Programm für die einzeitige und kontinuierliche Plexusanästhesie** unterstützt PAJUNK® mit seinen Katheterpunktionssets folgende Einsätze:

## Periphere Blockaden

### → Obere Extremitäten (Plexus brachialis)

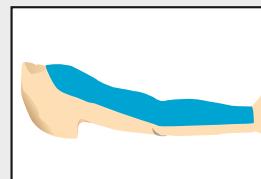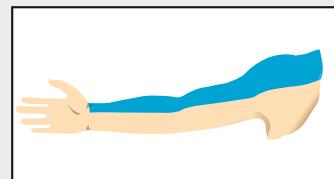


Interskalener Brachial Plexus Block

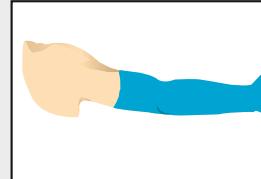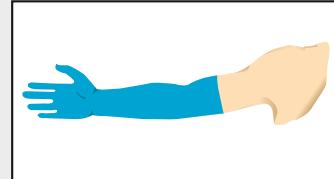


Axillärer Brachial Plexus Block


### → Untere Extremitäten (Plexus lumbosacralis)

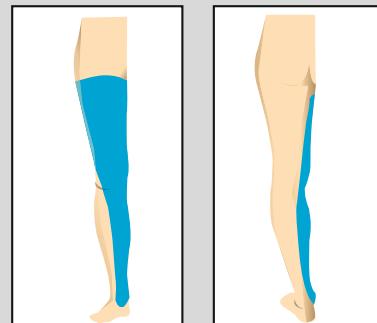

Femorale-Nervenblockade

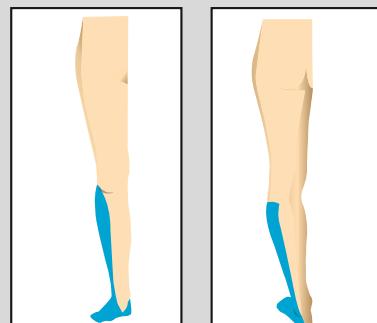

Ischiadicus-Nervenblockade

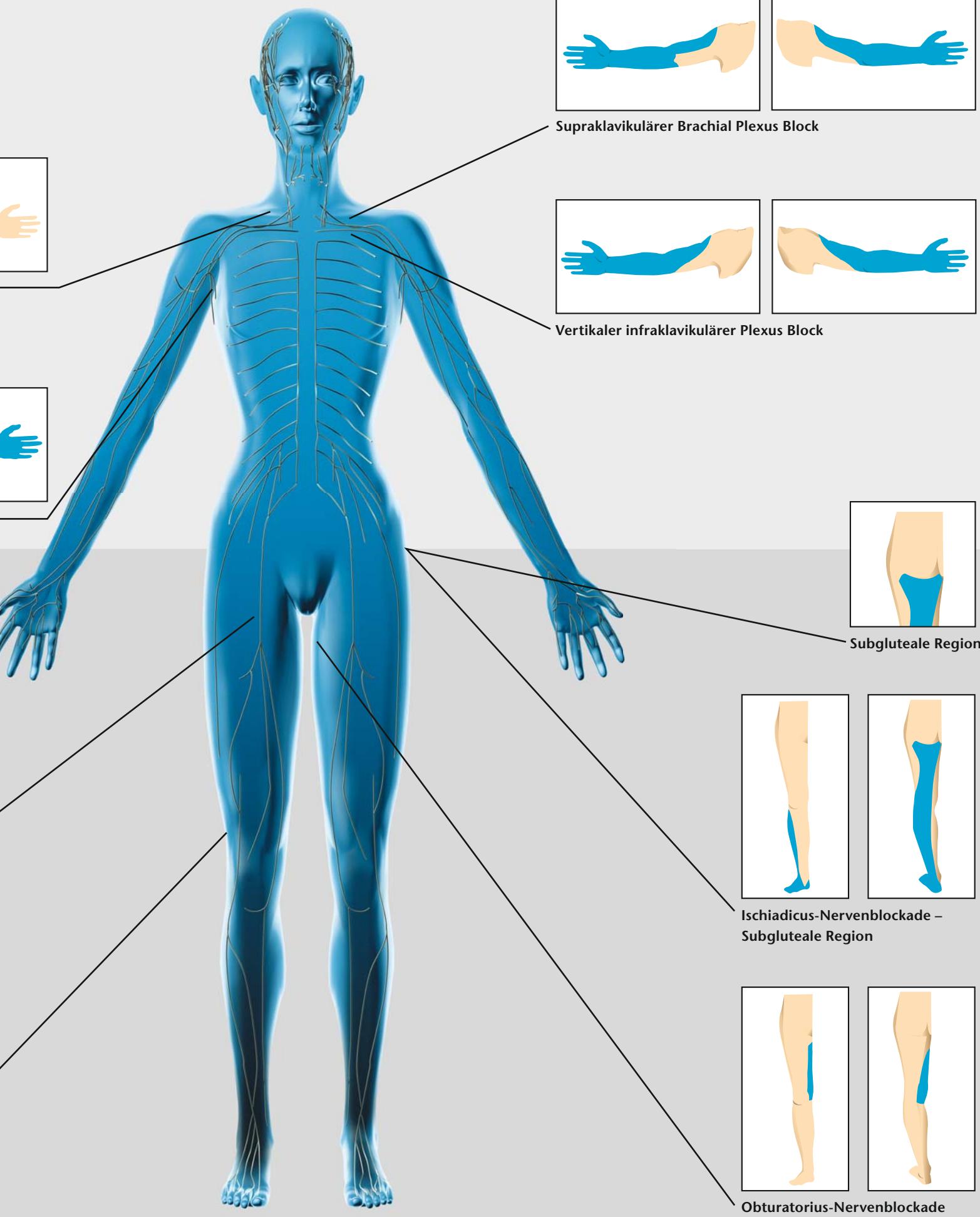


*NanoLine*

# *Ein Quantensprung in der Kanülenbeschichtung*

NanoLine ist eine absolute Weltneuheit im Bereich der Kanülenbeschichtung. Mit dieser revolutionären Dünnschichttechnologie gelingt es nämlich, die Isolationsschicht auf ein Minimum zu reduzieren, ohne dabei an Funktionsfähigkeit einzubüßen. Namhafte

Anästhesisten bestätigen vielmehr, dass mit dieser Polymerbeschichtung, die an der leicht goldenen Färbung erkennbar ist, die Punktionsfeinheit entsprechend feiner und die Nervenstimulation nachweislich präziser

ausgeführt werden kann. Das Material der NanoLine-Beschichtung wurde jahrelang erprobt und seine Verträglichkeit im Rahmen von Biokompatibilitäts- und Sensibilitätstests nachgewiesen.

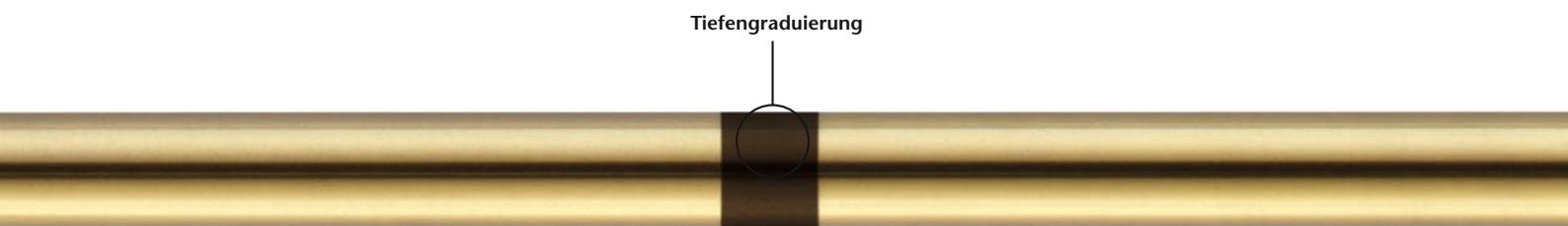

## **Einzigartig – die Beschichtung im Innenlumen**

Auf Basis der NanoLine-Dünnschichttechnologie können Kanülen erstmals nicht nur außen, sondern auch im Innenlumen beschichtet werden.

→ Sie gleicht Unebenheiten im Innenlumen aus und gewährleistet einen besseren Durchfluss des Anästhetikums.

## **Reduzierte Punktionskraft – perfekte Gleiteigenschaften**

Dank minimaler Schichtdicke wird der Außendurchmesser im Unterschied zu herkömmlichen Verfahren nicht verändert. Gleichzeitig erzielt die NanoLine-Beschichtung eine ausgezeichnete Oberflächenglätte.

→ Entsprechend lassen sich NanoLine-Kanülen mit reduzierter Einstichkraft punktieren und gleiten leichter durchs Gewebe.

## **Tiefengraduierung inklusive**

Zur besseren Lokalisierung weisen sämtliche NanoLine-Kanülen rundum eine Zentimeter-Tiefengraduierung auf.

→ Damit bleibt die Einstichtiefe stets unter Kontrolle.

Der Längsschnitt durch eine NanoLine-Kanüle zeigt die Innenbeschichtung.



NanoLine-Beschichtung



#### NanoLine-Summary:

- Die Schichtdicke wird auf ein Minimum reduziert
- Der Außendurchmesser der Kanüle wird nicht verändert
- Gleiche, hervorragende Isolations-eigenschaften wie herkömmliche Verfahren
- Reduzierte Punktkraft dank glatter Oberfläche
- Hochpräzise Stimulation über Kontaktpunkt an der Kanülen spitze


#### Perfekte Isolationseigenschaften – hochpräzise Stimulation

Die hauchdünne Polymerhaut gewähr-leistet eine 100%ige Isolation. Der Kon-taktpunkt für die Nervenstimulation an der Kanülen spitze bleibt blank.

➔ So erfolgt die Stimulation ausschließ-lich über die elektrisch leitende Punktions-pitze und erzeugt ein hochpräzises, elektrisches Feld.



Alternative Punktionspitze mit Facettenschliff oder als SPROTTE®-Kanüle mit stufenlosem Übergang zur Beschichtung.

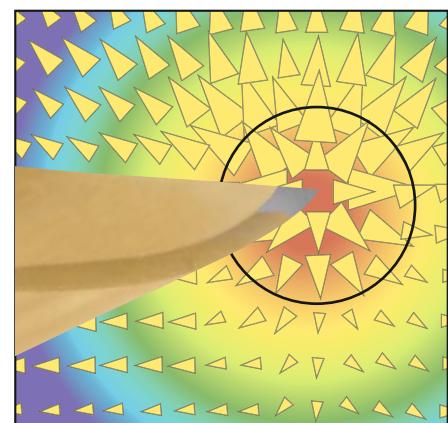

Hochpräzises, elektrisch leitendes Feld.


## *UniPlex-Kanülen*

# *Für die einzeitige, periphere Leitungsanästhesie*

Die UniPlex-Kanülen wurden von PAJUNK® eigens für die einzeitige Anwendung der peripheren Leitungsanästhesie entwickelt. Sie sind wahlweise in folgenden Ausführungen erhältlich:


### **UniPlex NanoLine Kanüle mit SPROTTE®-Spitze**

Die geschlossene Spitze der UPS-Kanüle ermöglicht dem Anästhesisten eineatraumatisch präzise Lokalisierung des Nervs.

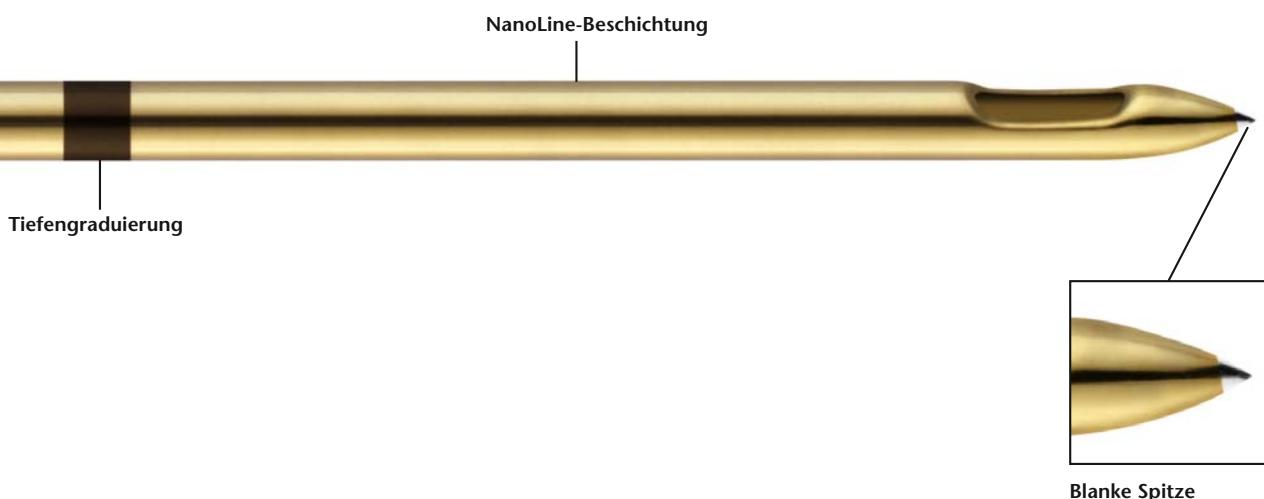

### **UniPlex NanoLine Kanüle mit Facettenschliff**

Dieser spezielle Facettenschliff reduziert die Verletzungsgefahr gegenüber herkömmlich scharfen Kanülen auf ein Minimum.

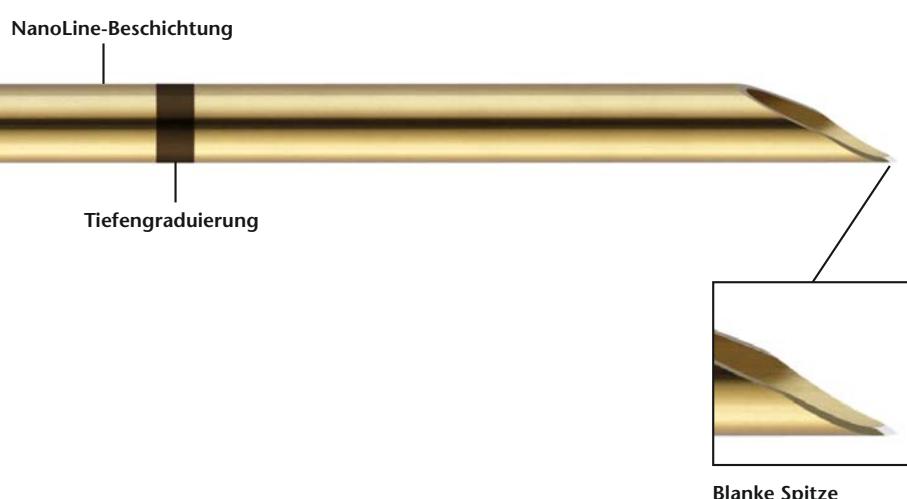



Alle UniPlex NanoLine Kanülen verfügen über einen **Zuspritzschlauch und ein Anschlusskabel**.

Der adaptierbare Zuspritzschlauch ermöglicht eine gleichzeitige Aspiration und Injektion. Er kann jederzeit vom Anästhesisten entfernt werden, falls er für die Arbeit hinderlich ist.

PAJUNK® bietet über die Punktionssets hinaus verschiedene **Nervenstimulatoren zur Lokalisation des Nervenplexus**.



Der MultiStim SENSOR unterstützt die patientenfreundliche, perkutane Lokalisierung und Identifizierung von Nerven mit Hilfe eines **Stimulationshandgriffs, der PEG-Elektrode** (Percutaneous Electronic Guidance) – ein wesentliches Differenzierungsmerkmal zu herkömmlichen Stimulationsgeräten.

Der MultiStim SWITCH ist der **einige Nervenstimulator, der auch Katheter stimulieren kann**. Über eine Umschaltfunktion kann der Anästhesist für die Stimulation Kanüle oder Katheter einfach per Tastendruck anwählen.

Mit der neuen Funktion der Patientenwiderstandsanzeige ist eine intraneurale, intravaskuläre und intrathekale Kanülenplatzierung sofort erkenn- und korrigierbar.

## Kontinuierliche Techniken

# Set-Varianten zur postoperativen Schmerzlinderung

Die kontinuierlichen Techniken der peripheren Nervenblockaden gewinnen in der Regionalanästhesie immer stärker an Bedeutung. Allein die Tatsache, dass hier das Lokalanästhetikum möglichst nahe am Nerv injiziert wird, macht sie zweifellos zu den effektivsten Techniken der Regionalanästhesie und Schmerztherapie. Denn so lassen sich die Belastungen des Patienten auf ein Minimum reduzieren und die periphere regionale Blockade in ihrer Ausbreitung sehr gut vorhersagen.

Auch komplizierte und umfangreiche Operationen können dank der kontinuierlichen Techniken mit Hilfe der Regionalanästhesie durchgeführt werden – ein wichtiger Schritt in der Anästhesie zu mehr Sicherheit für den Patienten. In der physiotherapeutischen Behandlung wird der postoperative Einsatz der kontinuierlichen Techniken zur Schmerzlinderung bzw. -beseitigung sehr geschätzt. Hier kann direkt nach dem operativen Eingriff mit dem schmerzfreien Bewegungstraining begonnen werden.

**PAJUNK® hat ein umfassendes Instrumentarium für die kontinuierlichen Techniken entwickelt:**



PlexoLong Set nach Meier



Individualset



PlexoLong Sono

Je nach Punktionsbesteck bietet PAJUNK® bis zu drei unterschiedliche Kanületypen an:

- SPROTTE®-SPEZIAL-Kanüle
- Tuohy-Kanüle
- Kanüle mit Facettenschliff

Während die Facettenschliff-Kanüle ausschließlich parallel zum Nerv platziert wird, eignen sich die SPROTTE®-SPEZIAL-Kanüle und die Tuohy-Kanüle überall dort, wo beim Einbringen des Katheters ein Austrittswinkel notwendig ist.

#### SPROTTE®-SPEZIAL-Kanüle



Für absolute Sicherheit bei der Anwendung empfiehlt PAJUNK® den Einsatz der **SPROTTE®-SPEZIAL-Kanüle**. Denn sie besitzt ein seitliches Auge, welches speziell verrundet und poliert ist.

- ▶ Ein Abscheren des Katheters kann ausgeschlossen werden.
- ▶ Dieatraumatische Spitze gewährleistet zusammen mit dem seitlichen Auge einen optimalen Austritt und eine zielführende Platzierung des Katheters.


#### Tuohy-Kanüle



Die **Tuohy-Kanüle** bietet dem Anästhesisten den bewährten Schliff aus der Epiduralanästhesie.

- ▶ Als beschichtete PlexoLong NanoLine Kanüle eignet sie sich besonders für Psoas-Kompartiment-Blockaden.

#### Kanüle mit Facettenschliff

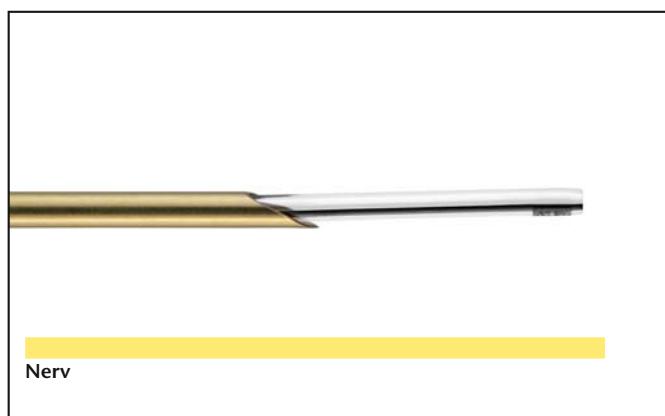

Die beschichtete **Kanüle mit Facettenschliff** wird dann eingesetzt, wenn sie parallel zum Nerv platziert werden kann.

- ▶ Es sollte stets darauf geachtet werden, dass die Position der Katheteröffnung zum Nerv hin ausgerichtet wird.

# PlexoLong NanoLine nach Meier


## Die direkte Injektion per Katheter

Das PlexoLong Set wurde in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Meier speziell für die peripheren Techniken zur Regionalanästhesie und Schmerztherapie entwickelt. Denn als erster und einziger Hersteller ermöglicht PAJUNK® mit dem PlexoLong Nanoline Set nach Meier, dass der **Katheter mit Hilfe eines Containers in sterilem Zustand direkt über die Kanüle gelegt** und das **Anästhetikum durch den Katheter injiziert**

wird. Eine Verweilkanüle ist dazu nicht erforderlich. Diese Technik ist **patentrechtlich geschützt** und zeichnet sich gegenüber den herkömmlichen Verfahren in der kontinuierlichen Plexusanästhesie durch ihre **äußerst einfache Handhabung** aus. Sie spiegelt die jahrzehntelange Kompetenz von PAJUNK® bei der Entwicklung und Produktion von Kathetern und Kanülen.

Das Set besteht aus:

- PlexoLong NanoLine Kanüle – wahlweise mit SPROTTE®-SPEZIAL-Kanüle, Tuohy-Kanüle und Kanüle mit Facettenschliff
- Katheter mit Stahlmandrin im Kathetercontainer
- FixoLong-System
- Farbcodierter Adapter

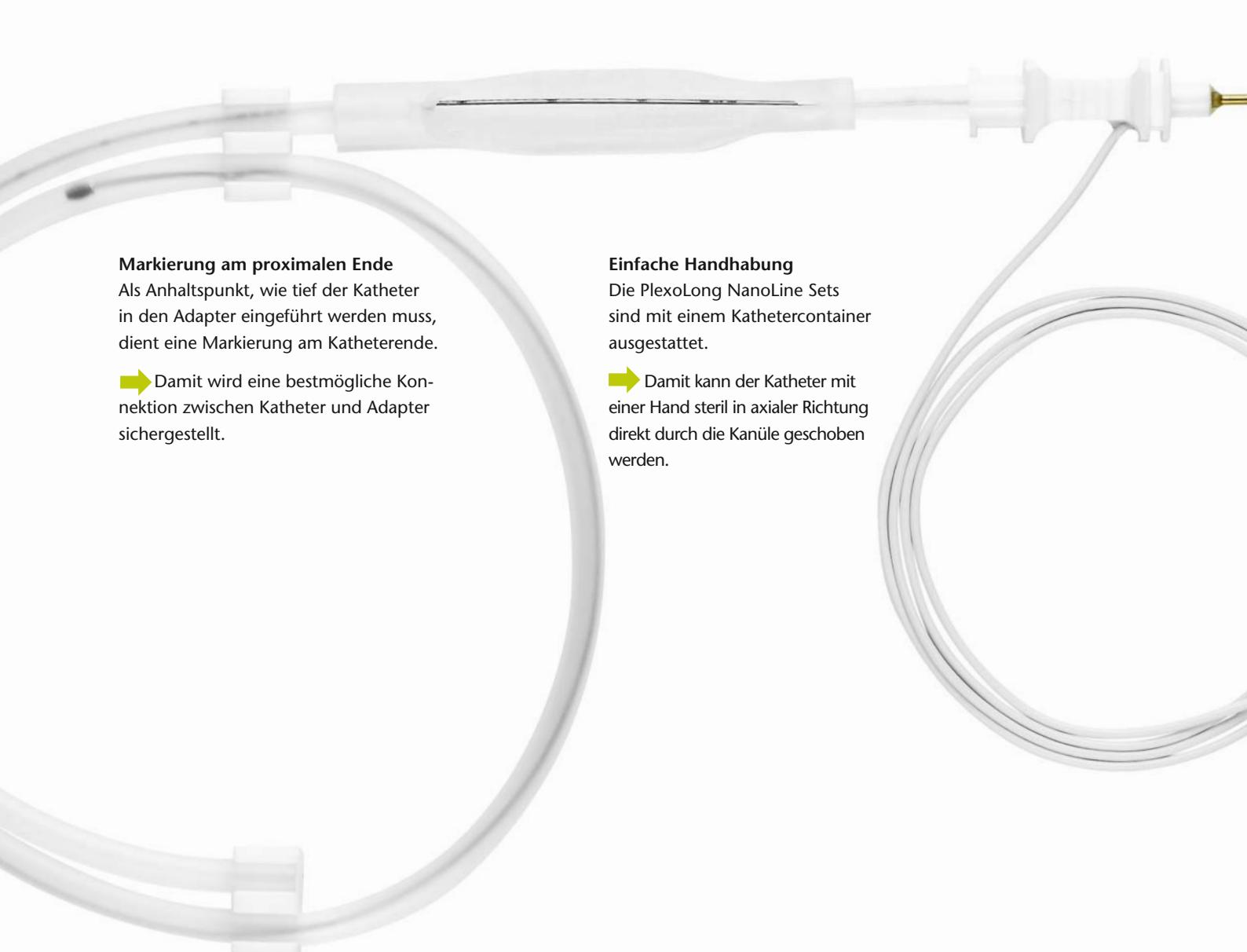

### Markierung am proximalen Ende

Als Anhaltspunkt, wie tief der Katheter in den Adapter eingeführt werden muss, dient eine Markierung am Katheterende.

→ Damit wird eine bestmögliche Konnektion zwischen Katheter und Adapter sichergestellt.

### Einfache Handhabung

Die PlexoLong NanoLine Sets sind mit einem Kathetercontainer ausgestattet.

→ Damit kann der Katheter mit einer Hand steril in axialer Richtung direkt durch die Kanüle geschoben werden.

Kathetercontainer

### Aufsteigende Tiefengraduierung

Auf dem 50cm langen Katheter ist bis zu einer Länge von 30cm in 5-cm-Schritten eine aufsteigende Tiefengraduierung angebracht.

→ Damit lässt sich seine Position zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmen.



### Stahlmandrin

Der Katheter des PlexoLong Sets besitzt einen Stahlmandrin, der an seinem Ende in der Einführhilfe arretiert und nach der Applikation des Katheters gemeinsam mit dem Container entfernt wird.

→ Dies verleiht dem Katheter maximale Stabilität.



### Katheter mit zentraler Öffnung

Der röntgenkontrastfähige Katheter ist zentral geöffnet.

→ Ein guter Durchfluss des Anästhetikums – gerade auch beim Anschluss an die postoperative Injektionspumpe – ist dadurch gewährleistet.



### Stimulationsanschluss

Die Kanüle verfügt über einen seitlichen Stimulationsanschluss, der mit einer federnden Buchse ausgestattet ist.

→ Die elektrische Verbindung ist dadurch jederzeit sichergestellt.

PlexoLong Katheter




PlexoLong NanoLine Kanüle



FixoLong



Filter

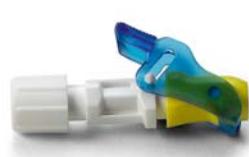

Clamping Adapter

## PlexoLong Sono


# Der knicksichere Katheter mit Edelstahlspirale

Die Beschaffenheit des Katheters ist für den reibungslosen Ablauf kontinuierlicher peripherer Nervenblockaden sehr entscheidend. Denn nur, wenn dieser knickfest ist und dadurch auch bei ungünstiger Patientenlage nicht abgedrückt werden kann, ist der Durchfluss des Anästhetikums bzw. Schmerzmittels jederzeit gewährleistet. Vor diesem Hintergrund hat PAJUNK® den PlexoLong Sono Katheter entwickelt. Er ist mit einer **integrierten Edelstahlspirale** ausgestattet und eignet sich **speziell für Langzeitbehandlungen in der Schmerztherapie und Plexusanästhesie**.

### Graduierung und Röntgenkontraststreifen

Der PlexoLong Sono Katheter ist auf den ersten 30 cm graduiert und mit Röntgenkontraststreifen ausgestattet.

→ Dies ermöglicht eine perfekte Erkennung sowie eine punktgenaue Platzierung des Katheters.

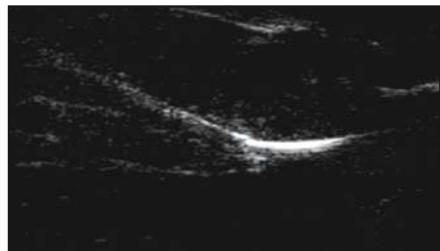

### Kathetercontainer und integrierte Edelstahlspirale


Nur bei PAJUNK® wird der Katheter im Container geliefert. Ebenfalls einzigartig ist die integrierte Edelstahlspirale.

→ Dies vermeidet den üblichen Memory-Effekt, der durch das Aufwickeln des Katheters in der Verpackung entsteht.

### Kathetermaterial

Das Kathetermaterial besteht aus durchsichtigem Polyamid.


→ Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Reißfestigkeit sowie hervorragende Gewebeverträglichkeit aus. Bei einer Fehlplatzierung kann der Eintritt von Blut sofort erkannt und entsprechend reagiert werden.

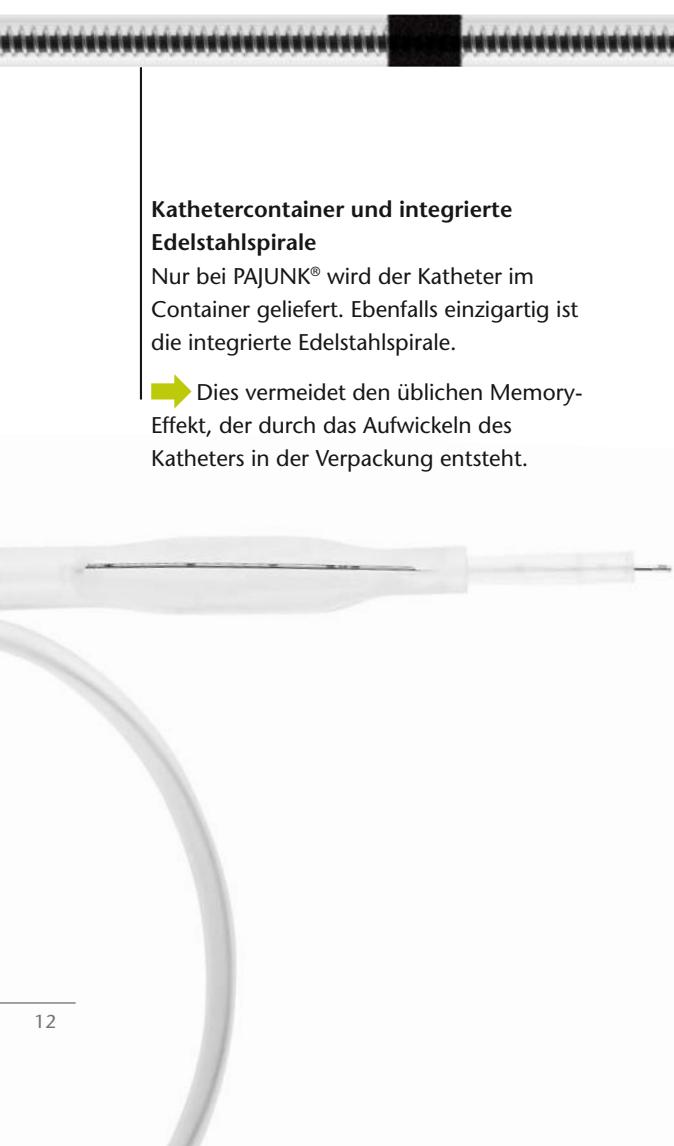

### Großes Innenlumen und integrierte Edelstahlspirale

Der PlexoLong Sono Katheter verfügt über ein besonders großes Innenlumen. Die integrierte Edelstahlspirale macht ihn absolut knicksicher.


→ Damit erfüllt der PlexoLong Sono Katheter die besten Voraussetzungen für eine sichere Konnektion an die Injektionspumpe, verbunden mit einem absolut ungehinder-ten Durchfluss des Anästhetikums – auch und gerade über einen längeren Zeitraum.

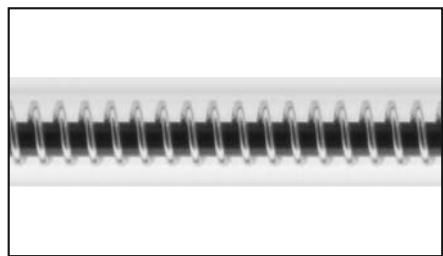

### Weiche, flexible Katheterspitze

Der Stahlmandrin endet 1 cm vor der Katheterspitze, die dadurch weich und flexibel bleibt.

→ Unbeabsichtigte Verletzungen von Gefäßen werden dadurch vermieden und ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Einführung und Platzierung des Katheters erreicht.

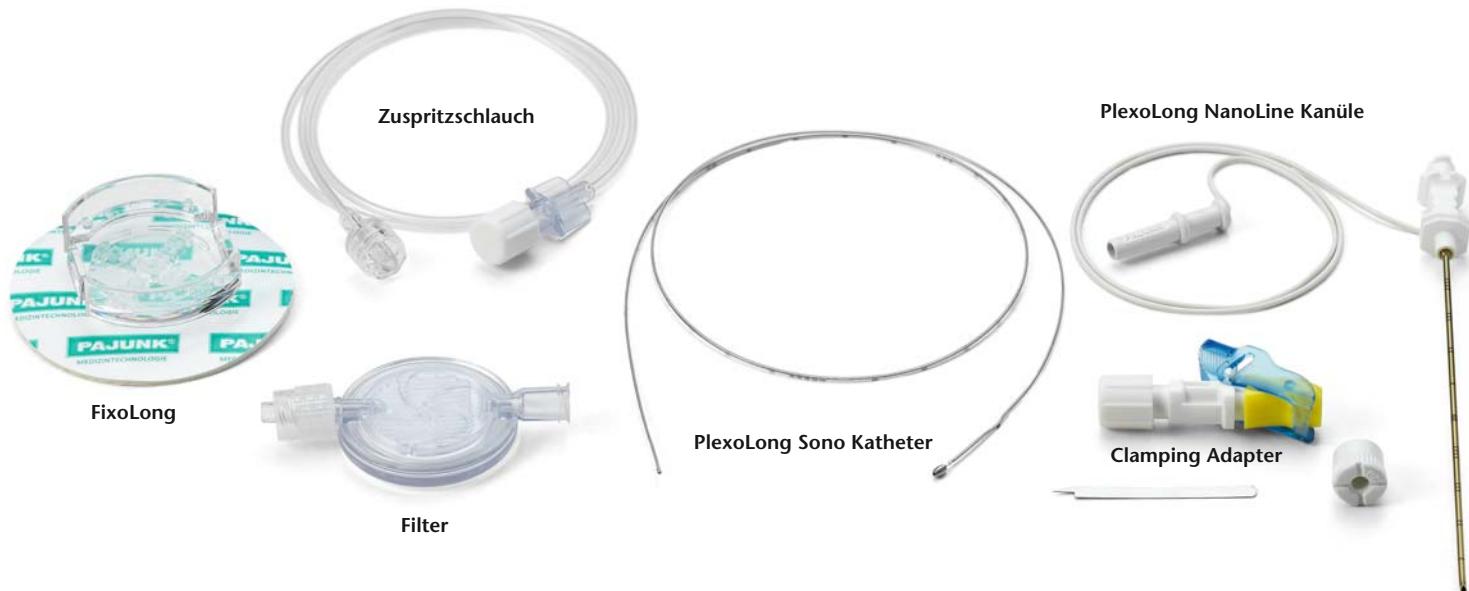

# StimuLong Sono

## Der stimulierbare Katheter

Der StmuLong Sono Katheter – eine Gemeinschaftsentwicklung von PAJUNK® und Dr. Kick – zeichnet sich durch seine **stimulierbare Spitze**, den **leitenden Stahlmandrin** sowie die **integrierte Metallspirale** aus. Zunächst wird der gewünschte Nerv über eine PlexoLong- oder UPK-Kanüle identifiziert. Dann wird der StmuLong Katheter unter Nervenstimulation bei

kontinuierlicher Anpassung der Stimulationsstromstärke vorgeschoben. Da das Innenlumen im Vergleich zu herkömmlichen Kanülen komplett beschichtet ist, kann von einer 100%igen Isolation ausgegangen werden. Die **Stimulation** erfolgt exakt dann, wenn die **Katheterspitze aus der Kanüle austritt**. Über die Reizantwort können direkt Rückschlüsse

auf die unmittelbaren nervösen Strukturen gezogen und der Katheter kann entsprechend präzise positioniert werden. An der minimalen Stromstärke, die zur Stimulation erforderlich ist, kann die Entfernung vom Nerv abgeleitet werden. Bei intermittierender, postoperativer Schmerztherapie ist auch eine sekundäre Lagekontrolle der Katheterspitze möglich.

### Stimulierbarer Katheter

Der Katheter verfügt durchgängig über eine elektrische Leitung.

→ Diese stellt die elektrische Verbindung zwischen Clamping Adapter und stimulierbarer Katheterspitze her.

### Kathetercontainer und integrierte Edelstahlspirale

#### Edelstahlspirale


Nur bei PAJUNK® wird der Katheter im Container geliefert. Ebenfalls einzigartig ist die integrierte Edelstahlspirale.

→ Dies vermeidet den üblichen Memory-Effekt, der durch das Aufwickeln des Katheters in der Verpackung entsteht.

### Kathetermaterial

Das Kathetermaterial besteht aus durchsichtigem Polyamid.

→ Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Reißfestigkeit sowie hervorragende Gewebeverträglichkeit aus. Bei einer Fehlplatzierung kann der Eintritt von Blut sofort erkannt und entsprechend reagiert werden.

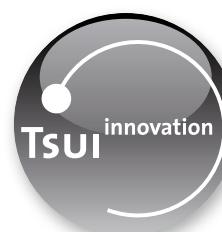


Die beiden Features „ungehinderter Durchfluss“ und „kein Memory-Effekt“ wurden in Zusammenarbeit mit Dr. Tsui von den University of Alberta Hospitals in Edmonton, Canada, entwickelt.

### **Integrierte Edelstahlspirale**

Dank der Edelstahlspirale ist der Katheter absolut knicksicher.

→ Dies gewährleistet den ungehinder-ten Durchfluss des Anästhetikums – auch und gerade über einen längeren Zeitraum.

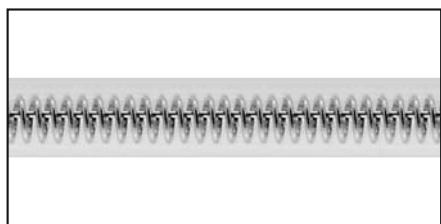

### **Graduierung und Röntgenkontraststreifen**


Der Katheter ist mit einer aufsteigenden Tiefengraduierung bis zu einer Länge von 30 cm in 5-cm-Schritten sowie mit Röntgenkontraststreifen ausgestattet.

→ Dies ermöglicht eine perfekte Loka-lisation. Darüber hinaus gewährleistet die Metallspirale eine 100%ige Ultraschall-sichtbarkeit – eine wichtige Voraussetzung für die optimale Katheterplatzierung.

### **Stimulierbare Spitze**

Die atraumatisch abgerundete Spitze des StimuLong Sono Katheters ist vergoldet.

→ Dies sorgt für höchstmögliche Leitfä-higkeit und hervorragende Stimulierbarkeit.

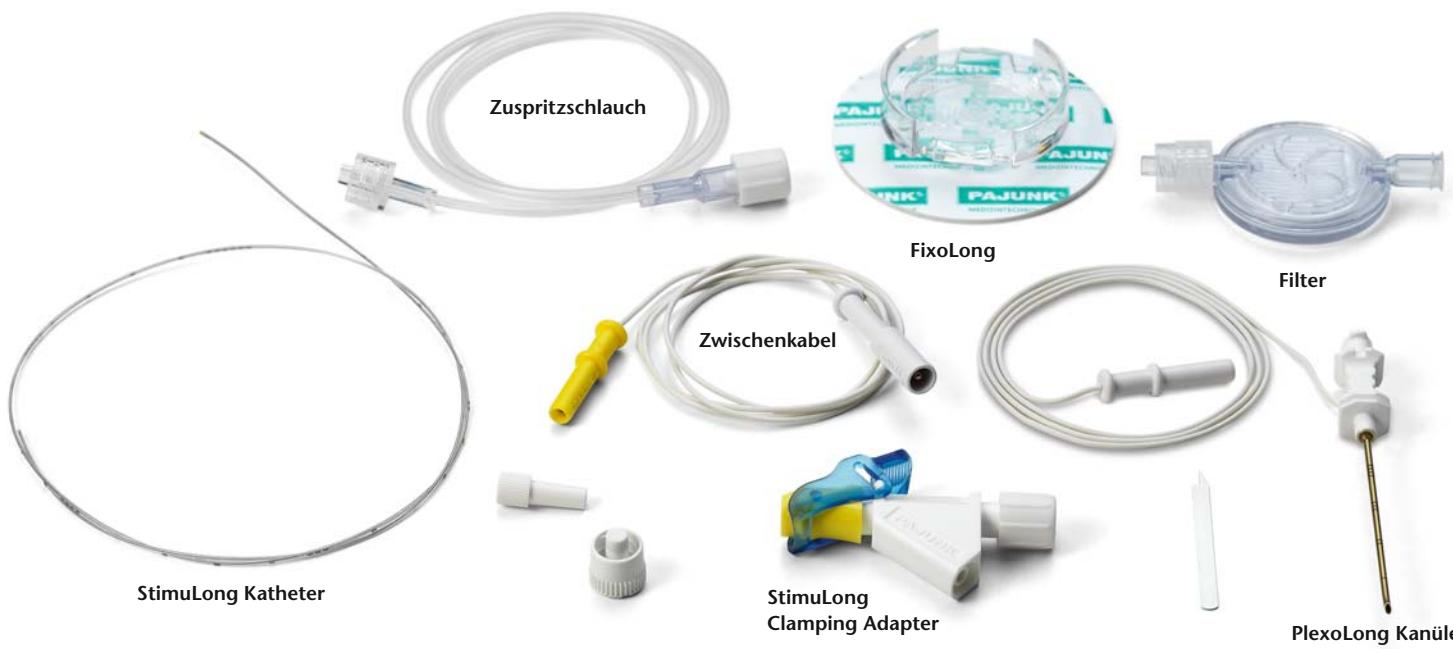


## *MultiSet NanoLine*

# *Die klassische Technik*

Die UniPlex-Kanülen UPK und UPKS des MultiSet NanoLine Sets ermöglichen die perineurale Platzierung einer Verweilkanüle. Diese Verweilkanüle besitzt äußerst gute Gleiteigenschaften, da sie vorne verjüngt und so zusammen mit der hauchdünnen NanoLine-Beschichtung einen fließenden Übergang zwischen Kanüle und Verweilkanüle schafft. Sie ist sehr flexibel und gleichzeitig sehr stabil – beste Voraussetzungen also für eine einfache und sichere Handhabung. Bei dieser Technik wird die operative Anästhesie



mit einem flexiblen Plexus-Katheter durchgeführt. Die UniPlex-Kanülen selbst besitzen denselben Durchmesser wie der Katheter, wodurch eine Leckage nahezu ausgeschlossen werden kann.

Die MultiSet NanoLine Technik erlaubt es, die Punktions mit besonders dünnen Kanülen vorzunehmen. Sie erhalten die UniPlex-Kanülen in verschiedenen Größen und mit zwei verschiedenen Spitzen: SPROTTE® (UPKS) und Facettenschliff (UPK).

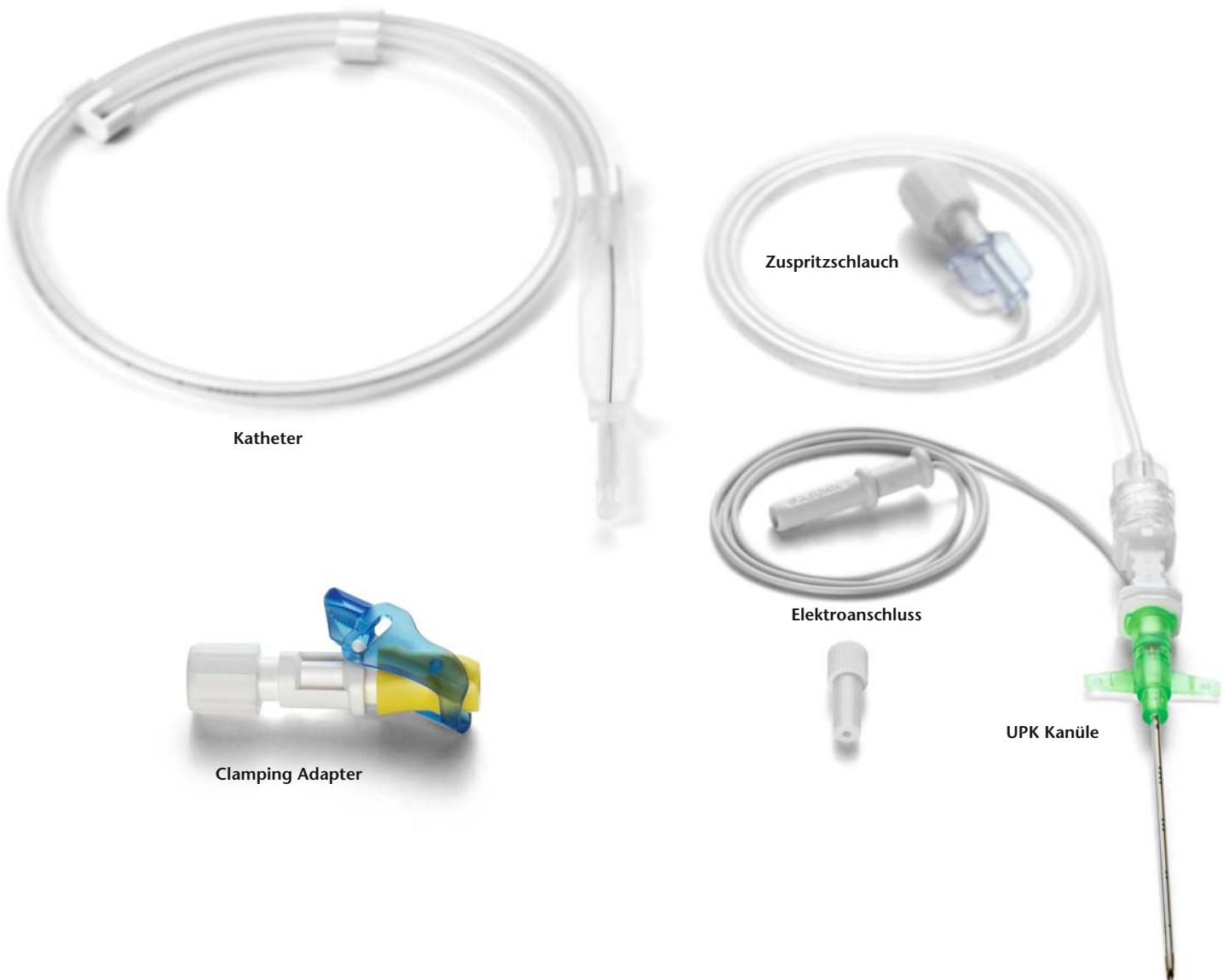

## *Clamping Adapter und Fixiersystem*

# **Das Zubehör für eine erfolgreiche Plexusanästhesie**

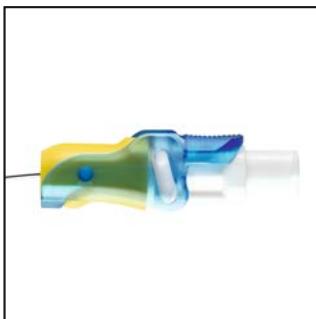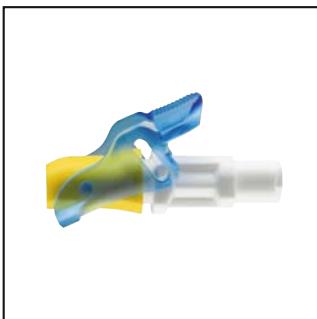

### **Farbcodierter Clamping Adapter**

Die Verbindung zwischen dem PAJUNK® Clamping Adapter und dem Katheter verfügt über eine spezielle Sicherung.

→ Sie vermeidet ein Überspannen und gewährleistet einen 100%igen Durchfluss des Anästhetikums.



### **FixoLong-System**

Mit FixoLong werden der Katheter und Filter in der Nähe des Katheteraustritts fixiert.

→ Dies bietet dem Patienten maximale Bewegungsfreiheit bei allen kontinuierlichen Anwendungen.





### **FixoCath**

Der FixoCath ist gleichzeitig Wundverband und Fixierung und wird direkt an der Austrittsstelle des Katheters angebracht.

→ Ein Abdrücken oder Abknicken des Katheters kann weitestgehend ausgeschlossen werden. Gleichzeitig ist eine maximale Bewegungsfreiheit für den Patienten gewährleistet.

# Plexusanästhesie komplett: Alles auf einen Blick

## UniPlex NanoLine Kanülen

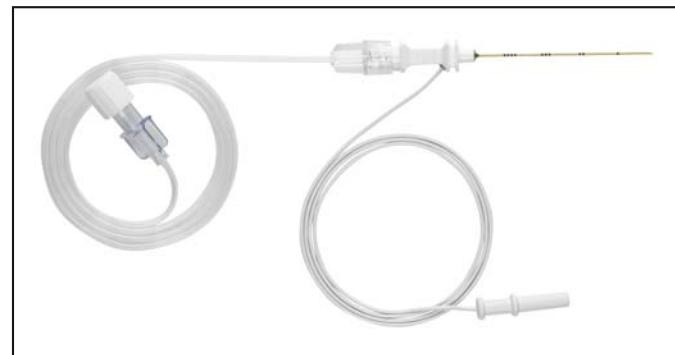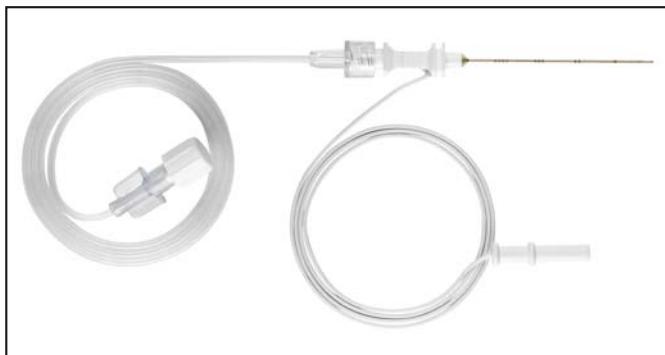


Produkt	Größe	Länge (mm)	Inch	Art.-Nr.	VE
<b>UniPlex NanoLine Facettenschliff</b>					
UP 3/25	24 G	25	1	001156-75	10
UP 3/35	25 G	35	1 3/8	001156-80	10
UP 3/40	22 G	40	1 5/8	001156-70	10
UP 3/50	25 G	50	2	001156-81	10
UP 3/50	22 G	50	2	001156-74	10
UP 3/80	25 G	80	3 1/4	001156-86	10
UP 3/80	22 G	80	3 1/4	001156-71	10
UP 3/100	22 G	100	4	001156-84	10
UP 3/100	21 G	100	4	001156-77	10
UP 3/120	22 G	120	4 3/4	001156-82	10
UP 3/120	20 G	120	4 3/4	001156-72	10
UP 3/150	20 G	150	6	001156-76	10



Produkt	Größe	Länge (mm)	Inch	Art.-Nr.	VE
<b>UniPlex NanoLine SPROTTE®</b>					
UPS 3/40	24 G	40	1 3/8	001156-30G	10
UPS 3/50	25 G	50	2	001156-29G	10
UPS 3/50	22 G	50	2	001156-31G	10
UPS 3/70	22 G	70	2 3/4	001156-31H	10
UPS 3/90	22 G	90	3 1/2	001156-31J	10
UPS 3/150	22 G	150	6	001156-28L	10

## PlexoLong NanoLine nach Meier

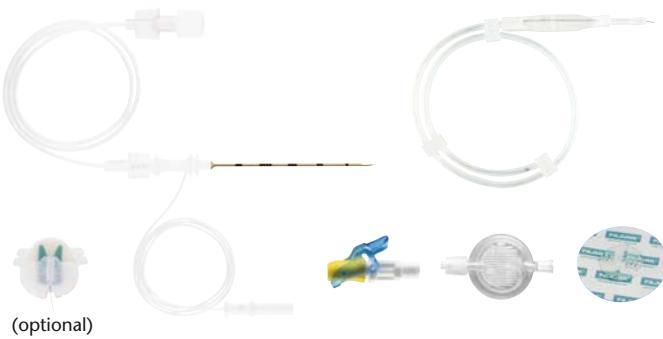

Alle PlexoLong NanoLine Sets kommen mit folgender Ausstattung:


- PlexoLong NanoLine Kanüle Luer Lock mit elektrischem Anschlusskabel
- Adaptierbarer Zuspritzschlauch
- PlexoLong Katheter 20 G x 50 cm mit zentraler Öffnung und Stahlmandrin
- Clamping Adapter (gelb)
- Filter 0,2 µm
- FixoLong
- FixoCath (optional)



Produkt	Größe	Katheter	Art.-Nr.	mit FixoCath	VE
Facettenschliff					
	19 G x 30 mm	20 G x 50 cm	541156-31A		10
	19 G x 50 mm	20 G x 50 cm	531156-31A		10
	19 G x 75 mm	20 G x 50 cm	561156-31A		10
	19 G x 100 mm	20 G x 50 cm	521156-31A	521256-31A	10
	19 G x 150 mm	20 G x 50 cm	511156-31A	511256-31A	10



SPROTTE®-SPEZIAL-Spitze	21 G x 30 mm	25 G x 50 cm	541156-31B	10
	19 G x 60 mm	20 G x 50 cm	531156-31B	531256-31B
	19 G x 120 mm	20 G x 50 cm	521156-31B	521256-31B
	19 G x 150 mm	20 G x 50 cm	511156-31B	10

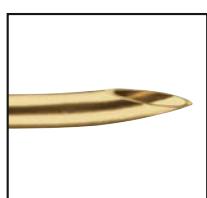

Tuohy-Spitze	21 G x 30 mm	25 G x 50 cm	541156-31C	10
	18 G x 50 mm	20 G x 50 cm	531156-31C	10
	18 G x 75 mm	20 G x 50 cm	561156-31C	10
	18 G x 100 mm	20 G x 90 cm	521156-34C	10
	18 G x 100 mm	20 G x 50 cm	521156-31C	10
	18 G x 150 mm	20 G x 50 cm	511156-31C	10

## Individualsets



Produkt	Art.-Nr.
<b>PlexoLong NanoLine Set</b>	
1 PlexoLong NanoLine Kanüle 19 G x 50 mm mit Facettenschliff, Luer Lock u. elektr. Anschlusskabel	531156-831A
1 adaptierbarer Zuspritzschlauch	
1 PlexoLong-Katheter 20 G x 50 cm mit zentraler Öffnung und Stahlmandrin	
1 Clamping Adapter (gelb)	
1 Filter 0,2 µm	
1 FixoLong	
1 Injektionskanüle 25 G x 42 mm	
1 Injektionskanüle 18 G x 50 mm	
1 Spritze 5 ml Luer Lock	
1 Spritze 20 ml Luer Lock	
3 Schaumstoffstieltpuffer	
1 Hautmarker	
5 Mullkompressen 8-fach, 5 x 5 cm	
1 transparentes Lochtuch, 75 x 60 cm	
1 Umtuch 90 x 110 cm	



Produkt	Art.-Nr.
<b>StimoLong Sono NanoLine Set</b>	
1 PlexoLong NanoLine Kanüle UP 19 G x 50 mm mit Facettenschliff, Luer Lock u. elektr. Anschlusskabel	531157-832A
1 adaptierbarer Zuspritzschlauch	
1 StimoLong Sono Katheter 20 G x 50 cm m. elekt. leitendem Mandrin, integrierter Metallspirale und zentraler Öffnung	
1 StimoLong Clamping Adapter (gelb)	
1 Zwischenkabel	
1 Filter 0,2 µm	
1 FixoLong	
1 Injektionskanüle 25 G x 42 mm	
1 Injektionskanüle 18 G x 50 mm	
1 Spritze 5 ml Luer Lock	
1 Spritze 20 ml Luer Lock	
3 Schaumstoffstieltpuffer	
1 Hautmarker	
5 weiße Mullkompressen 8-fach, 5 x 5 cm	
1 transparentes Lochtuch 75 x 60 cm	
1 Umtuch 90 x 110 cm	

## PlexoLong Sono NanoLine




Mit Ausnahme des Katheters kommen alle PlexoLong Sono NanoLine Sets mit der gleichen Ausstattung wie die PlexoLong NanoLine Sets:


- PlexoLong NanoLine Kanüle Luer Lock und elektrisches Anschlusskabel
- Adaptierbarer Zuspritzschlauch
- PlexoLong Sono Katheter 20 G mit integrierter Edelstahlspirale, Stahlmandrin und zentraler Öffnung
- Clamping Adapter (gelb)
- Filter
- FixoLong



Produkt	Größe	Katheter	Art.-Nr.	VE
Facettenschliff	19 G x 50 mm	20 G x 50 cm	531157-31A	10
	19 G x 75 mm	20 G x 50 cm	561157-31A	10
	19 G x 100 mm	20 G x 50 cm	521157-31A	10
	19 G x 150 mm	20 G x 50 cm	511157-31A	10

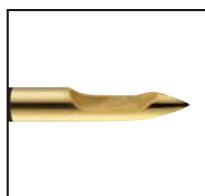


SPROTTE®-SPEZIAL-Spitze	19 G x 60 mm	20 G x 50 cm	531157-31B	10
	19 G x 120 mm	20 G x 50 cm	521157-31B	10

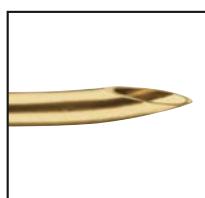

Tuohy-Spitze	18 G x 50 mm	20 G x 50 cm	531157-31C	10
	18 G x 75 mm	20 G x 50 cm	561157-31C	10
	18 G x 100 mm	20 G X 50 cm	521157-31C	10

## StimuLong Sono NanoLine

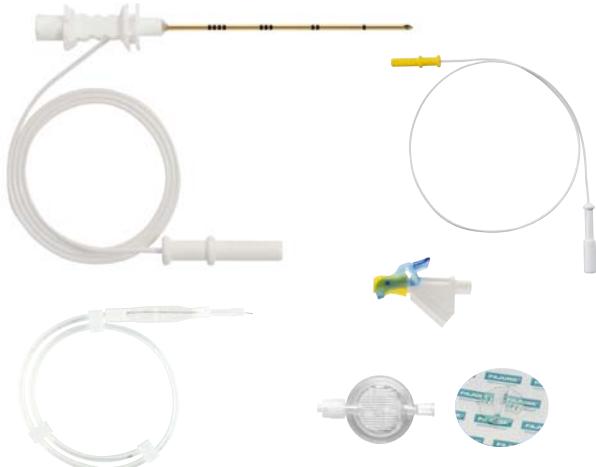

StimuLong Sono NanoLine Sets erhalten Sie mit unterschiedlichen Kanülen. Die Sets beinhalten folgende Komponenten:

- PlexoLong NanoLine Kanüle mit elektrischem Anschlusskabel und adaptierbarem Zuspritzschlauch
- StimuLong Sono Katheter 20 G x 50 cm mit elektrisch leitendem Mandrin, integrierter Edelstahlspirale und zentraler Öffnung
- StimuLong Clamping Adapter (gelb) mit integriertem Stimulationsanschluss
- Zwischenkabel
- Filter 0,2 µm
- FixoLong



Produkt	Größe	Verweilkanüle	Art.-Nr.	VE
<b>UPK Spitz NanoLine nach Kick mit innenl. Kanüle 5 mm überstehend</b>				
	21 G	18 G x 75 mm	221157-30E	10
	21 G	18 G x 51 mm	231157-30E	10




### PlexoLong NanoLine Spitz mit Facettenschliff

19 G x 50mm	531157-32A	10
19 G x 100mm	521157-32A	10
19 G x 150mm	511157-32A	10



### PlexoLong NanoLine Spitz mit SPROTTE®-SPEZIAL-Spitze


19 G x 60mm	531157-32B	10
19 G x 120mm	521157-32B	10

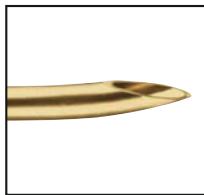

### PlexoLong NanoLine Spitz mit Tuohy-Spitze

18 G x 50mm	531157-32C	10
18 G x 100mm	521157-32C	10

## MultiSet NanoLine

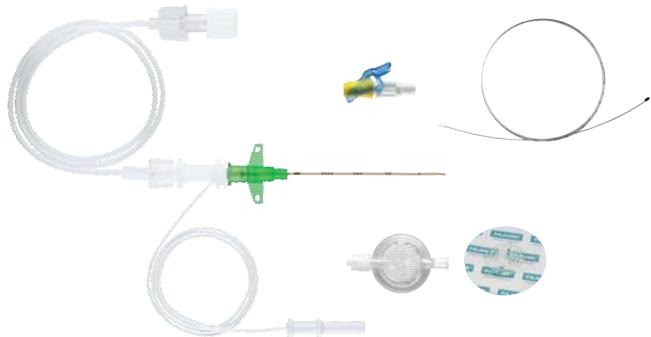

Die MultiSet NanoLine Sets von PAJUNK® enthalten:

- Stimulationskanüle
- Verweilkanüle
- Plexus-Katheter 20 G x 50 cm mit geschlossener Spitze und Stahlmandrin
- Clamping Adapter (gelb)



Produkt	Größe	Verweilkanüle	Art.-Nr.	0,2 µm-Flachfilter FixoLong	VE
<b>UPK mit Facettenschliff</b>					
	21 G	18 G x 51 mm	201156-30E		10
	21 G	18 G x 51 mm	201156-31E	•	10
	21 G	18 G x 75 mm	211156-30E		10
	21 G	18 G x 75 mm	211156-31E	•	10
<b>UPKS mit SPROTTE®-SPEZIAL-Spitze</b>	21 G	18 G x 51 mm	301156-30E		10

Produkt	Größe	Öffnung	Art.-Nr.	VE
<b>Plexuskatheter ohne Stahlmandrin, röntgenkontrastfähig, Katheteradapter (gelb), Einführhilfe</b>				
	20 G x 50 cm	distal geschlossen	121151-37C	10
<b>Plexuskatheter mit Stahlmandrin, röntgenkontrastfähig, Katheteradapter (gelb), Einführhilfe</b>				
	19 G x 50 cm	distal geschlossen	0001151-37	10
	20 G x 50 cm	distal geschlossen	001151-37B	10



Produkt	Art.-Nr.	VE
<b>FixoCath</b>	001151-37Z	10

## Nervenstimulator: MultiStim SENSOR



### MultiStim SENSOR

inkl. Gerätekoffer und Patienten-Kabel zum Anschluss von Stimulationskanülen

Art.-Nr.

1151-94-30

inkl. Gerätekoffer, PEG-Kabel zum Anschluss von Stimulationskanülen und monopolarem Handgriff

1151-94-32

MultiStim SENSOR

## Nervenstimulator: MultiStim SWITCH



### MultiStim SWITCH

inkl. Gerätekoffer und SWITCH-Kabel für die Konnektion von Kanüle und StimuLong-Katheter

Art.-Nr.

1151-94-40

SWITCH-Kabel zum Anschluss von Stimulationskanülen und stimulierbarem Katheter


1151-94-07

MultiStim SWITCH

## Zubehör für MultiStim SENSOR und MultiStim SWITCH



1)

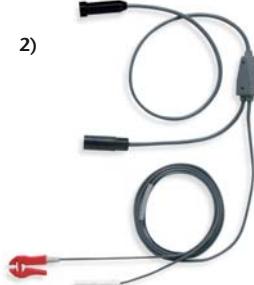

2)

3)



### Zubehör

1) Patienten-Kabel zum Anschluss von Stimulationskanülen 1151-94-13

2) PEG-Kabel zum Anschluss von Stimulationskanülen und monopolarem Handgriff 1151-94-14

3) PEG-Elektrode – Perkutaner, monopolarer Stimulationshandgriff, autoklavierbar 1151-94-17

Verlängerungskabel zum Anschluss von Stimulationskanülen, autoklavierbar\*) 01151-861F

Einweg-Verlängerungskabel, zum Anschluss von Stimulationskanülen, steril\*) 01151-861Q

\*) Verwendung für SWITCH und SENSOR

### PAJUNK GmbH

Medizintechnologie

Karl-Hall-Straße 1

D-78187 Geisingen

Telefon +49 (0) 77 04/92 91-0

Telefax +49 (0) 77 04/92 91-6 00

[www.pajunk.com](http://www.pajunk.com)

### PAJUNK Medical Produkte GmbH

Deutschland • Österreich • Benelux

Karl-Hall-Straße 1

D-78187 Geisingen

Telefon +49 (0) 77 04/80 08-0

Telefax +49 (0) 77 04/80 08-150

[www.pajunk.com](http://www.pajunk.com)