

Artikelnr 91289322010 (2893B) / 91076622010 (766B) Bälle aus Weich-PVC

Desinfektion und Pflege

Nach Gebrauch reinigen Sie das Produkt wie folgt:

- Keine Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis verwenden. Desinfektionsmittel können das Produkt zerstören.
- Zur Wischdesinfektion in Arztpraxen oder Krankenhäusern empfehlen wir das Flächendesinfektionsmittel Microbac® forte der Fa. BODE CHEMIE HAMBURG. Dabei handelt es sich nach Herstellerangaben um ein aldehyd- und aminfreies Flächendesinfektionsmittel auf Basis einer quaternären Ammoniumverbindung (QAV).
- Desinfektion durch kurzzeitiges Abkochen:
 - Separieren Sie den Ball vom Schröpfungsglas
 - Legen Sie den Ball in ein Bad mit kochendem Wasser. Bei mehreren Teilen achten Sie darauf, dass sich alle Teile in ausreichend sprudelndem Wasser lose schwimmend bewegen können. Länger anhaltende Temperaturen über 80 Grad Celsius zerstören das Produkt. Ein kurzzeitiger Temperaturanstieg bis 100 Grad Celsius (beim Abkochen) ist möglich.
- Dampfsterilisation im Autoklaven ist **nicht** möglich
- Gassterilisation ist möglich (vor Sterilisation ist eine Desinfektion durchzuführen)
- Nicht mikrowellengeeignet
- Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen

Haltbarkeit

Bei sachgemäßem Gebrauch, 5 Jahre nach Herstellungsdatum

Entsorgung

Das Produkt kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

31.01.2014

Rev.1